

Perclose ProGlide

NÃO APENAS FECHA. REPARA



“Porta” de saída do fio guia (troca rápida)



Monofilamento sutura cirúrgica



Mecanismo QuickCut

SEGURO

- Fechamento percutâneo para acesso arterial de até 21F;
- Hemostasia pode ser confirmada.

SIMPLES

- Único operador utiliza o mecanismo QuickCut;
- Nó pré-amarrado com entrega de sutura instintiva;
- Sequência de implantação numerada.

CONTROLE

- Capacidade de pré-fechar o fio;
- O acesso vascular pode ser mantido por toda a parte;
- Fornece acesso imediato;
- Redução do tempo para hemostasia, deambulação e alta.

Perclose ProGlide REFERÊNCIA DE VENDAS

Código do Produto	Descrição	Quantidade
12673-05	Inclui: <ul style="list-style-type: none">• 1 Perclose ProGlide 6F Sutura - Dispositivo de Fechamento por Sutura• 1 Aparador de Sutura	10 sistemas por caixa

QUATRO PASSOS IMPORTANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA SUTURA

- 1 Dispositivo avançado e alavanca de elevação (pé aberto).
- 2 Mantenha a tração e pressione o êmbolo (implantar agulhas).
- 3 Puxar para trás o êmbolo (implantar a sutura).
- 4 Alavanca Inferior (fechar Pé).






GESTÃO DA SUTURA

Aparador de Sutura - Avança o Nó de Sutura e apara a sutura.

A Capture o membro de sutura azul (trilho) na “porta” de sutura e avance o nó de sutura.

B Bloqueie o nó de sutura puxando o branco (sem trilho) membro de sutura.

C Apare os membros da sutura puxando a alavanca de aparar.

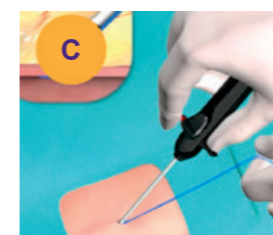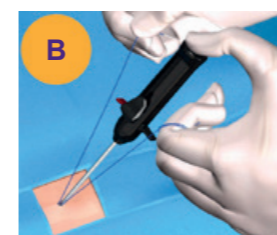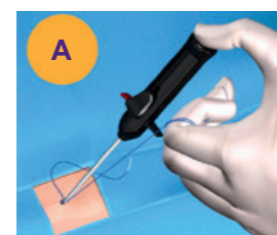

Perclose ProGlide

DISPOSITIVO DE FECHAMENTO POR SUTURA



NÃO APENAS FECHA. REPARA

©2018 Abbott. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste material são para uso exclusivo no Brasil. Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Rua Michigan, 735 - Brooklin, São Paulo - SP - 04566-905 - Brasil Central de Relacionamento com Cliente: 0800 703 1050

DIS DE FECHAMENTO PROGLIDE - Registro ANVISA Nº 80146501302


O ProGlide é marca da empresa Abbott. O produto mencionado neste material destina-se à utilização por ou sob a orientação de um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo. Todos os desenhos são apenas representações artísticas e não devem ser considerados desenhos técnicos ou fotografias. Testes realizados e dados arquivados pela Abbott Vascular.

Código SAP: 20031599
BR-50054-07 08/2019



AMPLA INDICAÇÃO*

O sistema de fechamento vascular Perclose ProGlide tem a **mais ampla indicação para acesso femoral arterial e venoso.**

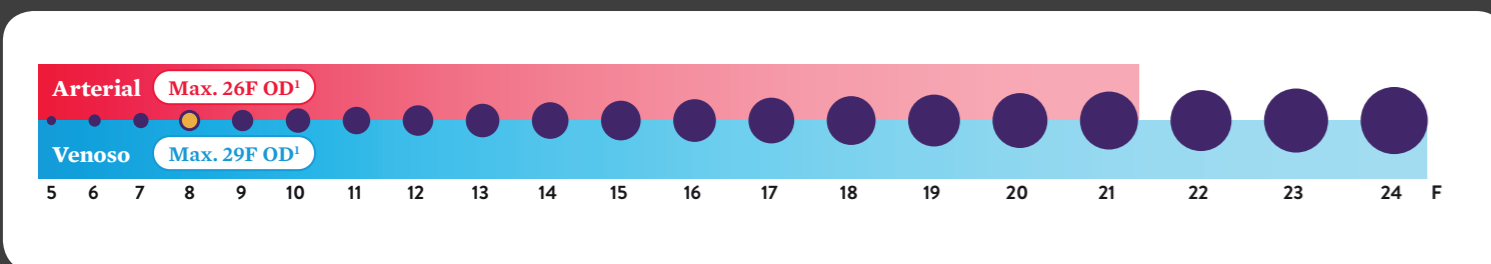

PARA LOCAIS COMUNS DE ACESSO FEMORAL


		Max. OD ¹
Arteria	5-21F ²	26F
Veia	5-24F ³	29F

- ASSEMELHA-SE AO PADRÃO DE OURO CIRÚRGICO
- PROMOVE A CICATRIZAÇÃO DAS VEIAS
- DA CONFIANÇA AOS LABORÁTORIOS

NÃO APENAS FECHA. REPARA

O Perclose ProGlide fornece reparo cirúrgico percutâneo com uma sutura, oferecendo um reparo seguro e sem máscara.


O Perclose ProGlide promove a cicatrização por intenção primária¹ com menos cicatrizes² e reduz o tempo para hemostasia, deambulação e alta^{3,4}.

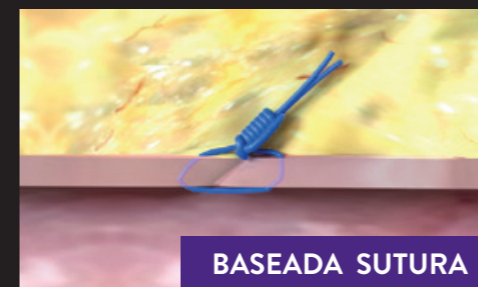

BASEADA SUTURA

INTENÇÃO PRIMÁRIA

Cura de feridas primária com reparo de sutura

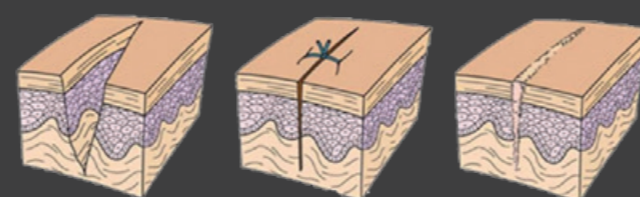

Incisão Limpa Sutura Precoce Cicatriz da "linha fina"


O uso de Perclose ProGlide para reparo de acesso arterial de grande calibre está associado a transfusões de sangue, infecções, mortalidade e tempo de internação significativamente menores em comparação com o corte⁵. O uso para acesso venoso de grande calibre também está associado a baixas complicações relacionadas ao local de acesso⁶.

VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO


PERCLOSE PROGLIDE

- Porta de saída do Fio Guia (Troca Rápida) - permite a inserção e remoção do fio guia
- Pé - Fornece confirmação táctil da correta posição do dispositivo quando aberto
- Nó de Sutura - Biocompatível USP 3-0 Classe I sutura de polipropileno monofilamento
- Marcador do lumen - Fornece a confirmação visual de posicionamento correto do dispositivo
- QuickCut - Permite o corte de suturas
- Alavanca - Abre e fecha o pé
- Logo do produto - indica a posição de implantação da sutura
- Alça - Para estabilização de dispositivos
- Êmbolo - Implanta as agulhas e a sutura

PERCLOSE PROGLIDE

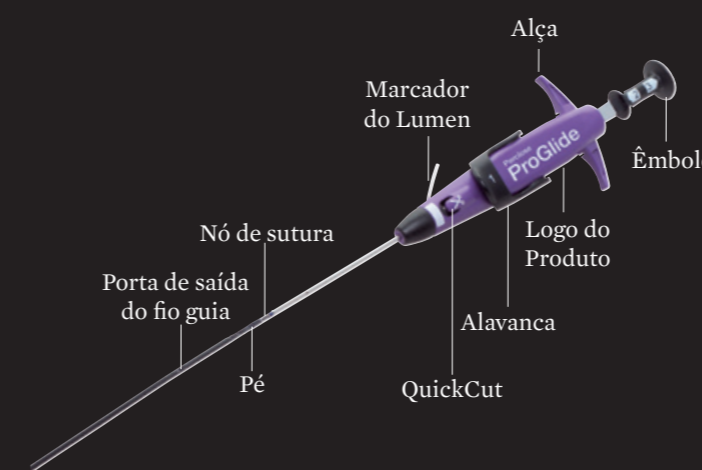

APARADOR DE SUTURA

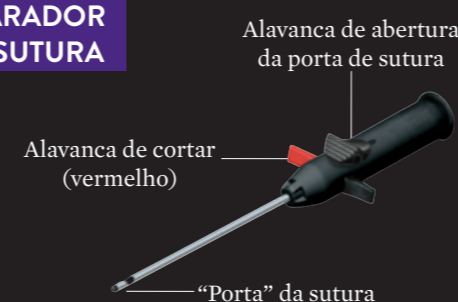

APARADOR DE SUTURA

- Aparador de Sutura - Avança o Nó de Sutura e permite aparar a sutura subcutânea
- "Porta" da Sutura - Abrir e fechar para capturar sutura
- Alavanca de cortar (vermelha) - Puxe para cortar a sutura
- Alavanca de abertura da porta de sutura- deslize para abrir e fechar o portão sutura

EVIDÊNCIA DO MUNDO REAL SOBRE O REPARO DE ACESSO ARTERIAL DE GRANDE CALIBRE

Perclose ProGlide X Corte Cirúrgico

O estudo clínico Perclose ProGlide X Corte Cirúrgico foi desenvolvido para comparar os desfechos clínicos e as taxas de complicações entre pacientes submetidos a fechamento de acesso arterial de grande calibre usando Perclose ProGlide X Cirurgia de corte em um cenário do mundo real.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

O uso de Perclose ProGlide para reparo de acesso arterial de grande calibre está associado com transfusão de sangue, infecções, mortalidade e tempo de permanência significativamente menores em comparação com o corte cirúrgico.

PACIENTES DO PERCLOSE PROGLIDE




Menos propenso a precisar de uma bolsa de sangue




Menos propenso a ter uma infecção



Menos propenso a morrer em 30 dias após o procedimento

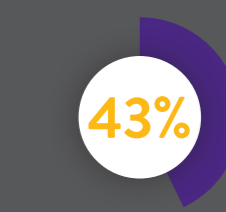

Estadia hospitalar mais curta

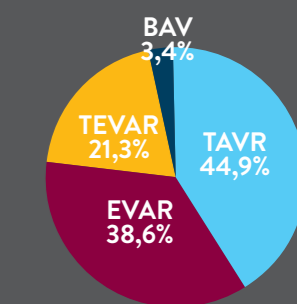

Os pacientes podem ter tido vários procedimentos durante admissão no índice


EVIDÊNCIA CLÍNICA NO FECHAMENTO DE ACESSO VENOSO DE GRANDE CALIBRE

Perclose ProGlide Cohort in the REALISM Clinical Trial

Uma análise prospectiva foi realizada para avaliar a segurança e eficácia do Perclose ProGlide no fechamento de grandes sites de acesso venoso através de uma coleta de dados retrospectiva. A análise prospectiva incluiu indivíduos nos quais o Perclose ProGlide foi usado como o método primário para o fechamento do local de acesso venoso de grande diâmetro durante o procedimento do índice MitraClip com uma bainha vascular

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- Complicações maiores diminuíram em 1,9%.
- Ausência de complicações relacionadas ao local de acesso da veia femoral principal foi de 98,1% em 30 dias.
- Perclose ProGlide é seguro e efetivo para fechamento local de acesso venoso com bainha de até 24F.

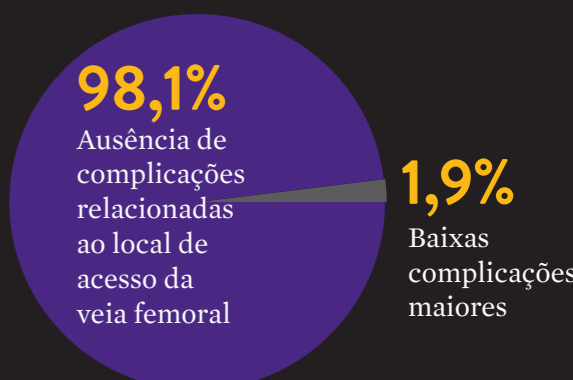

Baixas complicações maiores em 30 dias.

¹Em comparação com o Angio-Seal, o ExoSeal, o FemoSeal, o InClosure, o MANTA, o Mynx, o PerQseal, o Vascade, o Velox CD e o X-Seal. Dados em arquivo na Abbott.1. máx. OD 26F / 0,340 polegadas / 8,62 mm; Max. OD 29F / 0,378 polegadas / 9,59 mm. Testes realizados e dados em arquivo na Abbott.2. Para tamanhos de bainha arterial maiores que 8F, pelo menos dois dispositivos e técnica de pré-fechamento são necessários.3. Para tamanhos de bainha venosa maiores que 8F, pelo menos um dispositivo e uma técnica de pré-fechamento são necessários.